


Vision One Optics®

Enzyme

Für alle Arten von Kontaktlinsen: mit Multi-Enzym-Komplex

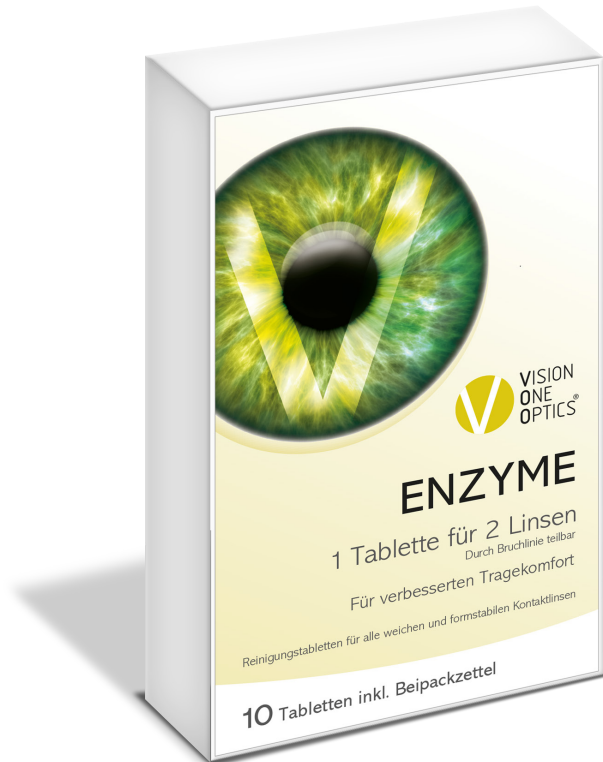

Enzymreinigung zur Entfernung aller natürlichen Ablagerungen auf Kontaktlinsen

Vision One Optics Enzyme

Anwendung: für alle weichen und formstabilen Kontaktlinsen

Inhaltsstoffe: Multi-Enzym-Komplex

Verpackungsgrößen: 10 Tabs

PE Proteinentfernung

EMPFEHLUNGEN ZUR ANWENDUNG

Vision One Optics Enzyme eignen sich für die Pflege aller Arten von Kontaktlinsen.

AUSFÜHRLICHE PRODUKTINFORMATIONEN

Das Enzymgemisch enthält Proteasen zur Proteinentfernung, Lipasen zur Entfernung von Lipiden, und Kohlenhydrate werden durch Amylasen wirksam beseitigt. Somit löst VOO Enzyme alle natürlichen Ablagerungen von der Kontaktlinsenoberfläche. Durch die praktische Bruchlinie kann die Tablette leicht geteilt werden. Dies ist wichtig, wenn die Kontaktlinsen in einem flachen 2-Kammer-Behälter gereinigt werden. Zur enzymatischen Reinigung gibt man in diesem Fall je eine Hälfte der Tablette in eine Kammer. Bei einem

hohen 1-Kammer-Behälter, in dem sich beide Linsen in einer Kammer befinden, gibt man die komplette Tablette in den Behälter. Dies bedeutet: Egal welcher Behälter, in jedem Fall wird für die enzymatische Reinigung beider Linsen nur eine Tablette benötigt.

Aufgelöst wird VOO Enzyme in der All-in-One Lösung. Bei der Verwendung von Peroxidsystemen werden die Tabs in der Peroxidlösung aufgelöst und bei formstabilen Pflegemitteln in der Aufbewahrungslösung. Sollte diese sehr viskös sein, empfiehlt sich die Auflösung der VOO Enzyme-Tabletten in Kochsalzlösung.

Mit einer effektiven enzymatischen Reinigung, die **alle** natürlichen Ablagerungen und nicht nur Proteine (wie bei Subtilisin der Fall) entfernt, wird der Tragekomfort der Kontaktlinsen deutlich erhöht.